




# dry-cap uv 2.1®


Electronic drying cap for all rechargeable hearing aids.




INSTRUCTION FOR USE

EN	INSTRUCTION FOR USE	2 - 3
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG	4 - 5
FR	MODE D'EMPLOI	6 - 7
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES	8 - 9
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES	10 - 11
IT	MANUALE DI ISTRUZIONI	12 - 13
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	14 - 15
GR	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ	16 - 17
TR	KULLANIM KILAVUZU	18 - 19
DK	BRUGERVEJLEDNING	20 - 21
SE	BRUKSANVISNING	22 - 23
HU	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	24 - 25
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	26 - 27
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	28 - 29
CN	用法說明	30 - 31
JP	取扱説明書	32 - 33

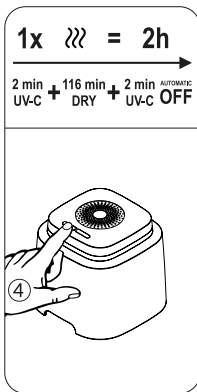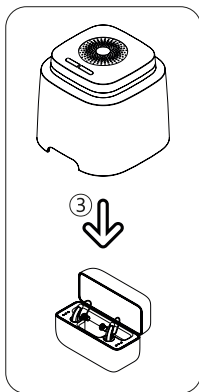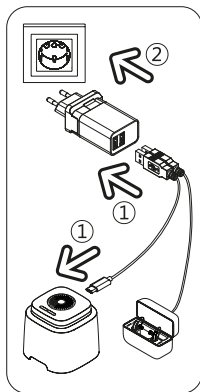

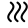1x  = 2h  
2 min UV-C + 116 min DRY + 2 min AUTOMATIC UV-C OFF

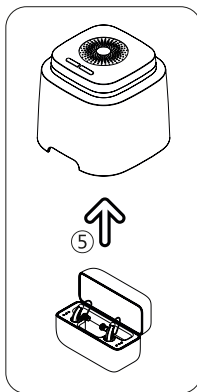

## PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

### ???

#### Tryb *Dry&Clean* (2 h)

Tryb *Dry&Clean* to automatyczny program łączący szybkie osuszanie za pomocą wydajnego wentylatora oraz sterylizację za pomocą światła UV-C na początku i na końcu cyklu osuszania w celu zapewnienia idealnego poziomu higieny.

### ☀

#### Tryb *Clean* (2 min)

Tryb *Clean* to krótki program higienizacyjny używający światła UV-C, które skutecznie eliminuje do 99,9% drobnoustrojów, bakterii oraz grzybów występujących w gospodarstwie domowym.

### Pierwsze użycie



1. Podłącz kabel USB do gniazda USB w dwuportowym zasilaczu USB, a wtyczkę USB-C do gniazda z tyłu urządzenia dry-cap uv 2.1°. Przewód USB stacji ładującej można podłączyć do drugiego gniazda USB.
2. Następnie należy podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego. ⓘ Urządzenie dry-cap uv 2.1° jest gotowe do użycia

### Włączanie trybu ??? *Dry&Clean* (2 h)

3. Umieścić akrylową osłonę urządzenia dry-cap uv 2.1° nad stacją ładującą z aparatami słuchowymi.
4. Nacisnąć lewy przycisk (tryb *Dry&Clean*), a program pielęgnacji (osuszanie + UV-C) uruchomi się automatycznie.
  - Szybkim osuszaniem za pomocą wentylatora steruje mikroprocesor, a cały cykl trwa 2 h ⓘ kontrolka LED świeci w sposób ciągły
  - Światło ultrafioletowe (253,7 nm) zabija do 99,9% drobnoustrojów i bakterii w ciągu 2 min. ⓘ kontrolka LED miga
  - Po 2 min światło UV-C wyłącza się automatycznie i kontynuowany jest proces osuszania ⓘ kontrolka LED świeci w sposób ciągły
  - Podczas ostatniej minuty 30-minutowego programu osuszania uruchamiany jest drugi program higienizacyjny UV-C ⓘ kontrolka LED miga
  - Po 2 h urządzenie dry-cap uv 2.1° wyłącza się automatycznie i przechodzi w tryb gotowości ⓘ kontrolka LED wyłącza się

Osuszanie i sterylizacja zostają ukończone, aparaty słuchowe nadal ładują się w stacji ładującej i mogą pozostać pod osłoną akrylową urządzenia dry-cap uv 2.1° po wyłączeniu stacji ładującej.
5. Zdjąć urządzenie dry-cap uv 2.1° i umieścić je obok stacji ładującej. Wyjąć osuszone i wysterylizowane aparaty słuchowe ze stacji ładującej.

## Włączanie trybu Clean (2 min)

3. Założyć akrylową osłonę urządzenia dry-cap uv 2.1<sup>®</sup> na produkty, które mają być poddane sterylizacji.
4. Nacisnąć prawy przycisk (tryb *Clean*), a program higienizacyjny (UV-C) uruchomi się automatycznie.
  - Światło ultrafioletowe (253,7 nm) zabija do 99,9% drobnoustrojów i bakterii w ciągu 2 min.  kontrolka LED miga
  - Po 2 min urządzenie dry-cap uv 2.1<sup>®</sup> wyłącza się automatycznie i przechodzi w tryb gotowości  kontrolka LED wyłącza się  
Sterylizacja zostaje ukończona.
5. Unieść urządzenie dry-cap uv 2.1<sup>®</sup> i umieścić je obok produktów. Wyjąć wysterylizowane produkty.

## Konserwacja i obsługa

Zalecamy używanie wilgotnych ściereczek do czyszczenia urządzenia dry-cap uv 2.1<sup>®</sup>. Należy również przeczytać instrukcje dotyczące pielęgnacji i obsługi aparatów słuchowych oraz stacji ładującej. Urządzenie dry-cap uv 2.1<sup>®</sup> jest bardzo energooszczędne. Wtyczkę należy wyjmować z gniazdka elektrycznego wyłącznie w przypadku dłuższego okresu nieużywania. Proces osuszania w trybie *Dry&Clean* można przerwać, naciskając przycisk na ponad 3 sekundy lub unosząc i pochylając urządzenie.

## Ostrzeżenia

Należy unikać kontaktu z wodą. Nie używać urządzenia dry-cap uv 2.1<sup>®</sup> w pobliżu umywalki itd. W razie wystąpienia usterki należy odłączyć urządzenie dry-cap uv 2.1<sup>®</sup> od zasilania i dostarczyć go do sprzedawcy. Nie należy rozmontowywać urządzenia dry-cap uv 2.1<sup>®</sup> i należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza 5 V. Dzieci nie powinny być pozostawione bez nadzoru, aby nie używały urządzenia dry-cap uv 2.1<sup>®</sup> jako zabawki. Urządzenie dry-cap uv 2.1<sup>®</sup> nie jest przeznaczone do użytku przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie mają odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy w zakresie obsługi urządzenia dry-cap uv 2.1<sup>®</sup>, chyba że znajdują się, ze względu na ich bezpieczeństwo, pod nadzorem osoby odpowiedzialnej lub zostały pouczone, w jaki sposób korzystać z urządzenia dry-cap uv 2.1<sup>®</sup>. **PRZESTROGA:** Nie należy się wpatrywać w światło UV-C, ponieważ może to spowodować uszkodzenie oczu i skóry. Urządzenie dry-cap uv 2.1<sup>®</sup> jest wyposażone w czujnik bezpieczeństwa 3G. W przypadku poruszenia, obrócenia lub przechylenia urządzenia dry-cap uv 2.1<sup>®</sup> w trakcie jego działania czujnik 3G wyłącza urządzenie! W trybie bezczynności należy ponownie uruchomić urządzenie. Używać wyłącznie produktów nadających się do sterylizacji światłem UV-C - nie wolno używać produktu na ludziach i zwierzętach!



Nie utylizować urządzeń elektrycznych wraz z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Należy je przekazać do zakładów utylizacji odpadów elektrycznych. Wyrzucanie urządzeń elektrycznych na wysypiska śmieci może spowodować przedostanie się niebezpiecznych substancji do wód gruntowych, a następnie do łańcucha pokarmowego, zagrażając zdrowiu i dobremu samopoczuciu ludzi.



**flow-med GmbH**  
Weinbergweg 10  
73773 Aichwald  
Germany

CH REP

Otoplastic AG  
Merkurstr. 4  
9000 St. Gallen  
Switzerland

Item No. 90710100

Document No. IFU\_90710100\_2022-09-13

© 2010-2022 flow-med GmbH. All rights reserved.

[www.flow-med.com](http://www.flow-med.com)

