





dry-cap uv 3[®]

Rechargeable drying cap for all hearing aids.



INSTRUCTION FOR USE

EN	INSTRUCTION FOR USE	2 - 5
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG	6 - 9
FR	MODE D'EMPLOI	10 - 13
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES	14 - 17
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES	18 - 21
IT	MANUALE DI ISTRUZIONI	22 - 25
NL	GEbruIKSAANWIJZING	26 - 29
GR	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ	30 - 33
TR	KULLANIM KILAVUZU	34 - 37
DK	BRUGERVEJLEDNING	38 - 41
SE	BRUKSANVISNING	42 - 45
NO	BRUKSANVISNING	46 - 49
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	50 - 53
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	54 - 57
CN	用法說明	58 - 61
JP	取扱説明書	62 - 65

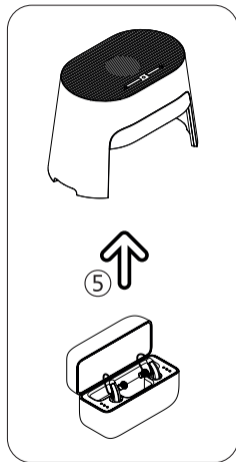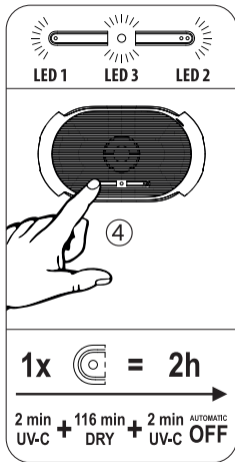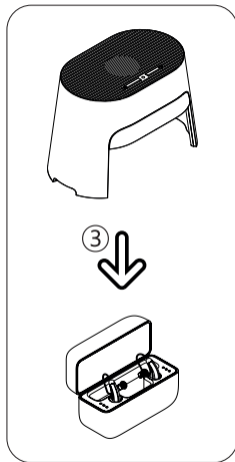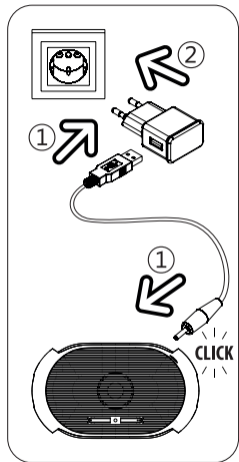

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

○ Tryb Dry&Clean (2 godziny)

Tryb Dry&Clean to automatyczny program łączący szybkie osuszanie za pomocą wydajnego wentylatora oraz sterylizację za pomocą światła UV-C na początku i na końcu cyklu osuszania w celu zapewnienia idealnego poziomu higieny.

○○ Tryb Clean (2 minuty)

Tryb Clean to krótki program higienizacyjny używający światła UV-C, które skutecznie eliminuje do 99,9% drobnoustrojów, bakterii oraz grzybów występujących w gospodarstwie domowym.

Pierwsze użycie

1. Podłączyć przewód USB do gniazda USB zasilacza (5V/1A), natomiast okrągłą wtyczkę do gniazda z tyłu urządzenia dry-cap uv 3[®].
2. Następnie należy podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.
 - Urządzenie dry-cap uv 3[®] naładuje się po ok. 2,5 godz. i jest gotowe do pracy przez ok. 5 cykli w trybie Dry&Clean lub ok. 60 cykli w trybie Clean.

① LED 3 zielono błyska

① LED 3 świeci na zielono

○ Praca w trybie Dry&Clean (2 godziny)

- Umieścić osłonę urządzenia dry-cap uv 3[®] nad stacją ładującą z aparatami słuchowymi.
- Nacisnąć lewy przycisk (tryb Dry&Clean), a program pielęgnacji (osuszanie + UV-C) uruchomi się automatycznie.
 - Szybkim osuszaniem za pomocą wentylatora steruje mikroprocesor, a cały cykl trwa 2 godz. ⓘ LED 1 świeci
 - Światło ultrafioletowe (253,7 nm) zabija do 99,9% drobnoustrojów i bakterii w ciągu 2 min. ⓘ LED 1 błyska
 - Po 2 min światło UV-C wyłącza się automatycznie i kontynuowany jest proces osuszania. ⓘ LED 1 świeci
 - W ciągu ostatnich 2 minut 2-godzinnego programu suszenia odbywa się druga higiena UV-C. ⓘ LED 1 błyska
 - Po 2 godz. urządzenie dry-cap uv 3[®] wyłącza się automatycznie i przechodzi w tryb gotowości. ⓘ LED 1 wyłącza sięOsuszanie i sterylizacja zostają ukończone, aparaty słuchowe nadal ładują się w stacji ładującej i mogą pozostać pod osłoną akrylową urządzenia dry-cap uv 3[®] po wyłączeniu stacji ładującej.
- Zdjąć urządzenie dry-cap uv 3[®] i umieścić je obok stacji ładującej. Wyjąć osuszone i wysterylizowane aparaty słuchowe ze stacji ładującej.

○○ Praca w trybie Clean (2 minuty)

- Umieścić osłonę urządzenia dry-cap uv 3[®] nad stacją ładującą z aparatami słuchowymi.
- Nacisnąć prawy przycisk (tryb Clean), a program higienizacyjny (UV-C) uruchomi się automatycznie.
 - Światło ultrafioletowe (253,7 nm) zabija do 99,9% drobnoustrojów i bakterii w ciągu 2 min. ⓘ LED 2 błyska
 - Po 2 min urządzenie dry-cap uv 3[®] wyłącza się automatycznie i przechodzi w tryb gotowości. ⓘ LED 2 wyłącza sięSterylizacja zostaje ukończona.
- Unieść urządzenie dry-cap uv 3[®] i umieścić je obok produktów. Wyjąć wysterylizowane produkty.

Konserwacja i obsługa

Zalecamy stosowanie wilgotnych ściereczek do czyszczenia urządzenia dry-cap uv 3[®]. Należy również przeczytać instrukcje dotyczące pielęgnacji i obsługi aparatów słuchowych oraz stacji ładującej. Urządzenie dry-cap uv 3[®] jest bardzo energooszczędne. Należy je naładować dopiero po rozładowaniu akumulatora litowo-jonowego (patrz Pierwsze użycie). ⓘ LED 3 świeci na czerwono. Proces osuszania w trybie Dry&Clean można przerwać, naciskając przycisk na ponad 3 sekundy lub unosząc i pochylając urządzenie.

! Ostrzeżenia

Należy unikać kontaktu z wodą! Nie wolno używać urządzenia dry-cap uv 3[®] w pobliżu zlewu lub w podobnych miejscach! Unikać naprężeń mechanicznych spowodowanych uderzeniami lub upadkiem! Nie wolno używać urządzenia dry-cap uv 3[®] w pobliżu ognia

lub łatwopalnych przedmiotów! W razie usterki urządzenie należy przekazać do sprzedawcy! Nie wolno demontować urządzenia! Dzieci nie powinny być pozostawione bez nadzoru, aby nie dopuścić do używania urządzenia jako zabawki! Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia!

UWAGA: Nie należy się wpatrywać w światło UV-C, ponieważ może to spowodować uszkodzenie oczu i skóry! Urządzenie dry-cap uv 3[®] jest wyposażone w czujnik bezpieczeństwa 3G. W przypadku poruszenia, obrócenia lub przechylenia urządzenia dry-cap uv 3[®] w trakcie jego działania czujnik 3G wyłącza urządzenie. W trybie bezczynności należy ponownie uruchomić urządzenie. Używać wyłącznie produktów nadających się do sterylizacji światłem UV-C - nie wolno używać produktu na ludziach i zwierzętach.

Utylizacja



Utylizację tego produktu elektronicznego oraz wbudowanego akumulatora litowo-jonowego należy przeprowadzać wyłącznie zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami! Niniejsze urządzenie ma nr rej. ZSEE DE 47525015 i jest przyjmowane jako odpad elektroniczny w wyznaczonych punktach zbiórki. Nie wolno wyrzucać go razem z odpadami z gospodarstwa domowego!



flow-med GmbH

Weinbergweg 10
73773 Aichwald
Germany

Item No. 908 00000

Document No. IFU_90800000_2021-11-29

© 2010-2021 flow-med GmbH. All rights reserved.

www.flow-med.com

