





vac-clean uv[®]

Rechargeable mini vacuum cleaner for all hearing aids.



INSTRUCTION FOR USE

EN	INSTRUCTION FOR USE	2 - 3
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG	4 - 5
FR	MODE D'EMPLOI	6 - 7
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES	8 - 9
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES	10 - 11
IT	ISTRUZIONI PER L'USO	12 - 13
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	14 - 15
GR	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ	16 - 17
TR	KULLANIM TALİMATI	18 - 19
DK	BRUGERVEJLEDNING	20 - 21
SE	BRUKSANVISNING	22 - 23
NO	BRUKSINSTRUKSJONER	24 - 25
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	26 - 27
RU	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	28 - 29
CN	使用说明 (简体中文)	30 - 31
JP	取扱説明書	32 - 33

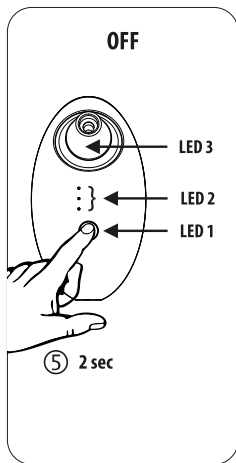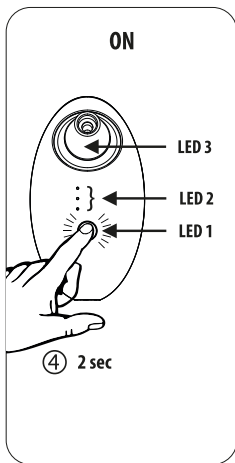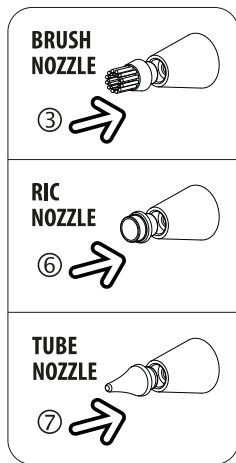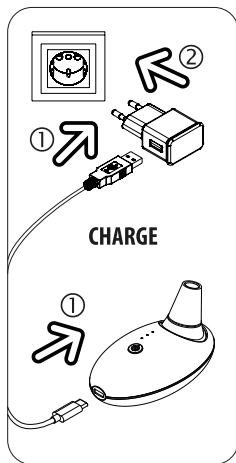

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wstępne czynności

1. Podłączyć przewód USB do gniazda USB zasilacza (5V/1A), a końcówkę USB-C do gniazda USB-C urządzenia vac-clean uv®.
2. Następnie podłączyć zasilacz do gniazdka elektrycznego.
 - Ładowanie urządzenia vac-clean uv® trwa ok. 2 godzin, a czas pracy po naładowaniu wynosi ok. 1,5 godziny**! UWAGA: nie korzystać z urządzenia podczas ładowania.**

❗ Dioda LED 1 zaświeci się na czerwono

❗ Dioda LED 1 zaświeci się na niebiesko

Praca z zamocowaną szczoteczką

3. Włożyć szczoteczkę do otworu na końcówki urządzenia vac-clean uv®.
4. Nacisnąć i przytrzymać przycisk 1 przez 2 sekundy aż silnik odkurzacza zacznie pracować na największym
 - Automatycznie rozpocznie się emitowanie światła UV o długości 450 nm o działaniu przeciwbakteryjnym.
 - Wziąć do ręki całkowicie suchy aparat słuchowy i równomiernie przesuwając szczoteczkę po wszystkich ściankach aparatu, aby poluzować i zebrać całą zeschniętą woskowinę i brud. W trakcie odkurzania należy delikatnie dociskać szczoteczkę
5. Po zakończeniu czyszczenia wyłączyć urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk 1 przez co najmniej 2 sekundy.

❗ Dioda LED 1 i dioda LED 2 (ooo)

❗ Dioda LED 3 zaświeci się

❗ Diody LED 1, LED 2 (ooo) i LED 3 zgasną

Praca z zamocowaną końcówką RIC

6. Włożyć końcówkę RIC do otworu na końcówki urządzenia vac-clean uv® i wykonać czynności opisane w punktach od 3-5.
 - Wziąć do ręki słuchawkę douszną RIC lub słuchawkę douszną aparatu słuchowego i bezpośrednio przyłożyć do wnętrza końcówki RIC, aby odessać woskowinę i brud z otworów. Ewentualne pozostałości na aparacie słuchowym popryskać niewielką ilością płynu czyszczącego i powtórzyć procedurę.

Praca z zamocowaną końcówką stożkową

7. Włożyć końcówkę stożkową do otworu na końcówki urządzenia vac-clean uv® i wykonać czynności opisane w punktach od 3-5.

- Włożyć końcówkę stożkową do zabrudzonych otworków aparatu słuchowego, takich jak odbiornik, mikrofon, otwór wentylacyjny (wylot), aby odessać z nich woskowinę i zanieczyszczenia. Ewentualne pozostałości na aparacie słuchowym popryskać niewielką ilością płynu czyszczącego i powtórzyć zabieg.

Konserwacja i obsługa

Zalecamy, aby czyścić urządzenie vac-clean uv®, przecierając je wilgotną ściereczką. Po użyciu odkręcić szczoteczkę, końcówkę RIC lub końcówkę stożkową i wymyć je w kąpeli poddźwiękowej (np. u-sonic 2), a następnie dokładnie osuszyć w osuszaczu (np. dry-cap uv 3®). Filtr w otworze do mocowania końcówek należy wymieniać w zależności od stopnia zabrudzenia. Należy również zapoznać się z treścią instrukcji dotyczącej pielęgnacji i obsługi aparatów słuchowych. vac-clean uv® jest bardzo energooszczędnym urządzeniem. Akumulator litowo-jonowy należy ładować dopiero w przypadku całkowitego wyczerpania (patrz Wstępne czynności) i gdy świeci się ❶ dioda LED 1. Urządzenie vac-clean uv® ma 3 poziomy ssania (ooo / oo / o) o różnej sile. W razie konieczności poziom ssania można zmienić, krótko naciskając przycisk.

! Ostrzeżenia

Należy unikać kontaktu z wodą! Nie wolno używać urządzenia vac-clean uv® w pobliżu zlewu lub w podobnych miejscach! Unikać naprężeń mechanicznych spowodowanych uderzeniami lub upadkiem! Nie wolno używać urządzenia vac-clean uv® w pobliżu ognia lub łatwopalnych przedmiotów! W razie usterki urządzenia należy je oddać do naprawy przez sprzedawcę! Nie wolno demontować urządzenia! Nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru, aby nie dopuścić do używania urządzenia jako zabawki! To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub po otrzymaniu od takiej osoby wskazówek dotyczących korzystania z urządzenia!



flow-med GmbH

Weinbergweg 10
73773 Aichwald
Germany

Item No. 611 00000

Document No. IFU_61100000_2022-03-03

© 2010-2022 flow-med GmbH. All rights reserved.

www.flow-med.com

