





dry-cap uv 4[®]

Smart electronic drying cap for all hearing aids.



INSTRUCTION FOR USE

EN	INSTRUCTION FOR USE	2 - 5
DE	GEBRAUCHSANWEISUNG	6 - 9
FR	MODE D'EMPLOI	10 - 13
ES	MANUAL DE INSTRUCCIONES	14 - 17
PT	MANUAL DE INSTRUÇÕES	18 - 21
IT	MANUALE DI ISTRUZIONI	22 - 25
NL	GEBRUIKSAANWIJZING	26 - 29
GR	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ	30 - 33
TR	KULLANIM KILAVUZU	34 - 37
DK	BRUGERVEJLEDNING	38 - 41
SE	BRUKSANVISNING	42 - 45
NO	BRUKSANVISNING	46 - 49
PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI	50 - 53
KR	사용 지침	54 - 57
CN	用法說明	58 - 61
JP	取扱説明書	62 - 65

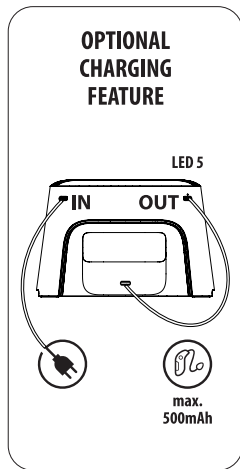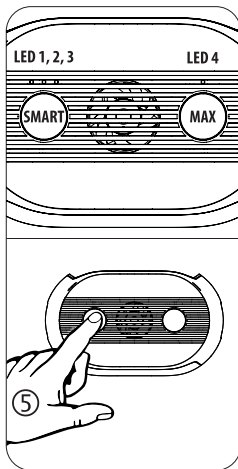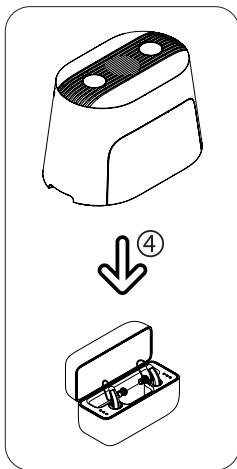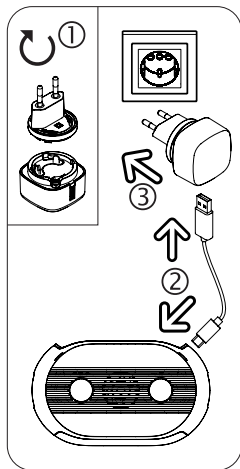

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tryb SMART (90 lub 120 lub 180 minut)

Po naciśnięciu tego przycisku czas suszenia zostanie automatycznie ustawiony na 90, 120 lub 180 minut w oparciu o aktualną temperaturę i wilgotność w miejscu suszenia zmierzoną przez wbudowany czujnik.

Tryb MAX (4 godziny)

W tym trybie czas suszenia jest ustawiany ręcznie na 4 godziny, jeśli protetyk słuchu zalecił maksymalny czas suszenia, np. z powodu silnego pocenia się.

Działanie

1. Włóż adapter odpowiedni dla danego kraju do zasilacza USB, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do gniazda.
2. Podłącz kabel USB do zasilacza USB (5V/2A), a wtyczkę USB-C do portu USB-C (IN) z tyłu urządzenia dry-cap uv 4®.
3. Następnie podłącz zasilacz do gniazda sieciowego.

4. Umieść urządzenie dry-cap uv 4® nad stacją ładującą z aparatami słuchowymi. Jeśli stacja ładowania aparatów słuchowych ma pokrywę, przed suszeniem należy ją otworzyć.
5. Naciśnij żądany przycisk (tryb SMART lub MAX), a program pielęgnacji (suszenie ciepłym powietrzem + UV-C) uruchomi się automatycznie. ⓘ LED 1, 2, 3 lub 4 zaświecą się.
 - Szybkie suszenie za pomocą wentylatora z ciepłym powietrzem (do 38°C / 100°F) jest kontrolowane przez mikroprocesor i działa przez 90, 120, 180 minut w trybie SMART lub 4 godziny w trybie MAX, w zależności od trybu.
 - Podczas suszenia ultrafioletowe światło LED (275 nm) eliminuje zarazki i bakterie do 99,9% na początku i przed końcem czasu suszenia.
 - Po zakończeniu suszenia i higieny urządzenie dry-cap uv 4® automatycznie przełącza się w tryb gotowości.
ⓘ LED 1, 2, 3 lub 4 wyłączają się.

Suszenie i higiena są zakończone, ładowanie aparatów słuchowych w stacji ładującej jest kontynuowane i mogą one pozostać pod dry-cap uv 4® po wyłączeniu stacji ładującej.

Opcjonalna funkcja ładowania

Nakładka dry-cap uv 4® ma z tyłu drugi port USB-C do wyjścia (OUT). Można go używać do ładowania ładowarki aparatów słuchowych. Należy pamiętać, że moc wyjściowa jest ograniczona do 500 mA. Dioda LED 5 zaświeci się na zielono, gdy moc będzie mniejsza lub równa 500 mA, a dioda LED5 wyłączy się, jeśli podłączone urządzenie będzie wymagało więcej niż 500 mA mocy. W takim przypadku należy użyć oddzielnego zasilacza.

Konserwacja i obsługa

Zalecamy stosowanie wilgotnych chusteczek do czyszczenia dry-cap uv 4®. Należy również zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji i użytkowania aparatów słuchowych i stacji ładującej. Urządzenie dry-cap uv 4® jest bardzo energooszczędne; zasilacz należy odłączać tylko w przypadku dłuższej nieobecności. Proces suszenia można przerwać w obu trybach, przytrzymując przycisk przez ponad 3 sekundy lub podnosząc i przechylając urządzenie.

! Ostrzeżenia

Unikać kontaktu z wodą. Nie używaj suszarki dry-cap uv 4® w pobliżu umywalki itp. W przypadku awarii należy odłączyć zasilanie i zanieść urządzenie dry-cap uv 4® do sprzedawcy. Nie demontować urządzenia dry-cap uv 4® i

używać wyłącznie dostarczonego zasilacza 5 V. Dzieci muszą być nadzorowane, aby nie używały dry-cap uv 4® jako zabawki. Urządzenie dry-cap uv 4® nie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy na temat urządzenia dry-cap uv 4®, chyba że dla własnego bezpieczeństwa będą one nadzorowane przez odpowiedzialną osobę lub otrzymają instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia dry-cap uv 4®.

PRZESTROGA: Nie należy patrzeć w światło UV-C, ponieważ może to spowodować uszkodzenie oczu i skóry. Urządzenie dry-cap uv 4® jest wyposażone w czujnik bezpieczeństwa 3G. Jeśli dry-cap uv 4® zostanie poruszony, obrócony lub przechylony podczas użytkowania, czujnik 3G wyłączy urządzenie! W trybie bezczynności należy ponownie uruchomić urządzenie. Używaj tylko z produktami czyszczonymi promieniami UV-C, nigdy z ludźmi i zwierzętami!

Utylizacja



Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesegregowanych odpadów komunalnych; korzystaj z oddzielnych punktów zbiórki. Jeśli urządzenia elektryczne zostaną wyrzucone na wysypiska śmieci, niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych i łańcucha pokarmowego, szkodząc zdrowiu i samopoczuciu.



flow-med GmbH
Weinbergweg 10
73773 Aichwald
Germany



Otoplastic AG
Merkurstr. 4
9000 St. Gallen
Switzerland

Item No. 912 00000

Document No. IFU_90900000_2025-02-27

© 2010-2024 flow-med GmbH. All rights reserved.

www.flow-med.com

